

取扱説明書



デジタル身長体重計モニターソフト

Data communication software for DST-210SB

対応バージョン : V1.0.0

ご注意

- 本書の内容については十分注意して作成しておりますが、万一ご不審な点、お気づきのことがありましたら弊社までご連絡ください。
- 本書の内容の一部または全部を、無断で複製することを禁止しています。
- 本書の内容は、改良のため予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

作成日 : 2024年7月16日

ムラテックKDS株式会社

目次

はじめに	3
1. 本書の目的	3
2. 必要なもの	3
3. 免責事項	3
4. 著作権	3
5. 商標	4
準備する	5
使用方法（基礎編）	6
(1) 機器の設定を確認する	6
(2) 機器を接続する	6
(3) 測定値を受信する	7
インストールの手順	8
トラブルシューティング	11
お問い合わせ窓口	12

はじめに

このたびはデジタル身長体重計 DST-210SB(以降、身体計)のデータ通信ソフト「DST-210SB モニターソフト(以降、モニターソフト)」をダウンロード頂き、誠にありがとうございます。

下記の注意事項は、ご使用になる前に必ずお読みください。

(1) 本書の目的

モニターソフトの導入から取り扱い方法、トラブルシューティングについて説明します。

身体計の操作については、製品に付属されている操作説明書、または取扱説明書を当社ホームページからダウンロードしてご確認ください。

(2) 必要なもの

モニターソフトを使用するには身体計、および Bluetooth 通信機能が付与されたパソコン (Bluetooth 通信用アダプターの使用も可)が必要です。

詳しくは後述の「準備物」のページでご確認ください。

(3) 免責事項

モニターソフトのご使用による如何なる損害やトラブルについて、当社は責任を負いません。必ず自己責任でご使用ください。

(4) 著作権

モニターソフトはフリーソフトですが、著作権はムラテック KDS 株式会社が所有します。

Copyright © Muratec-KDS Corporation.

ご不明な点がございましたら、弊社のお問い合わせフォーム等よりご連絡ください。

(5) 商標

- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。
- **Bluetooth**®ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.が所有権を有します。ムラテック KDS 株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。
- その他、各社の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。
- システム名、製品名等には、必ずしも商標表示(®、™)を付記していません。

準備する

のびおくんを使用するために必要なものを確認します。

- デジタル身長体重計 DST-210SB



- パソコン

Windows10 以降が正常動作するパソコンが必要です。

- Bluetooth パソコン用 USB アダプター


お手持ちのパソコンに Bluetooth 通信機能が無い場合は、下記のようなアダプターを別途、ご準備ください。



※写真は BUFFALO 社製 BSBT5D200BK

使用方法（基礎編）

モニターソフトの基本的な使い方について説明します。
インストールの方法については「インストールの手順」をご参照ください。

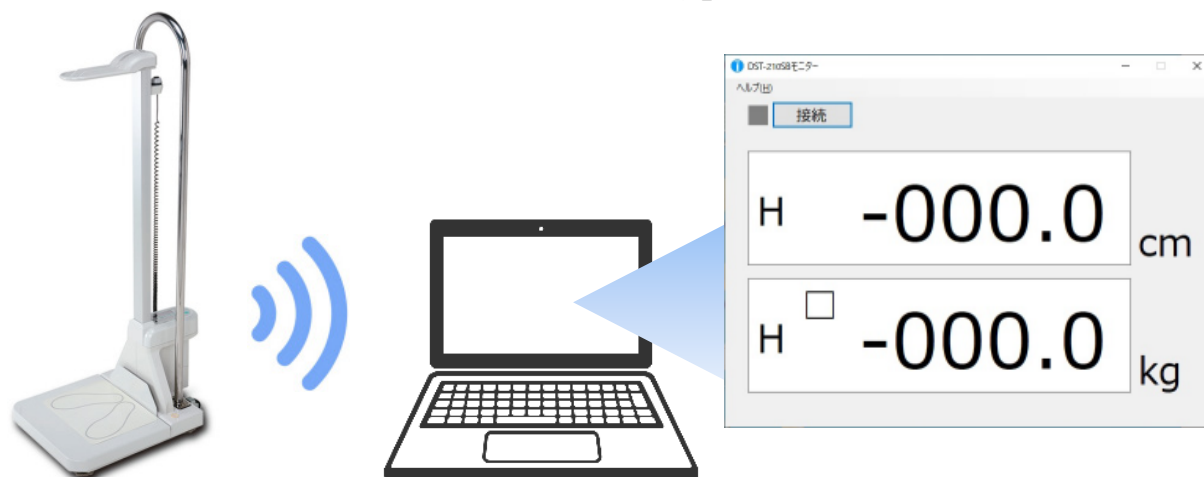

1. 機器の設定を確認する

身体計の Bluetooth 通信が「有効」、Bluetooth 出力モードが「連続出力モード」であることを確認してください。

※設定の確認方法は身体計の取扱説明書をご覧ください。

Bluetooth 通信	有効	B: ON
	無効	B: OFF
Bluetooth 出力モード	シングル出力モード	d: 0
	連続出力モード	d: 1
Bluetooth ID	ID 設定 (0~9)	R: 0
バージョン表示 (表示のみで、右図はバージョン 1.0 の場合)		F: 1.0

2. 機器を接続する

身体計とモニターソフトを起動し、パソコンの Bluetooth 通信機能が有効であることを確認して、モニターソフトのメイン画面にある[接続]ボタンをクリックします。



機器検索画面(Device Search)が表示されるので、「機器開始」ボタンをクリックし、機器の検索を実行してください。(検索時間 約 3 秒)

接続する機体を選択し、[機器接続]をクリックします。

何も検出されない場合は、身体計やパソコンの設定を再度ご確認ください。



3. 測定値を受信する

接続に成功すると「接続完了」のメッセージが表示され、メイン画面の接続インジケータがグリーンに変わります。

身体計は表示がリアルタイムでコンピュータの画面上に表示されます。

モニターを終了する場合は[接続解除]ボタンをクリックしてください。





モニターソフトに測定値を保存する機能はありません。

測定値を保存したい場合は「のびおくん SB」をご使用ください。


インストールの手順

のびおくんのインストールについて説明します。

- (1) 「setup.exe」を右クリックして[管理者として実行(A)]をクリックします。

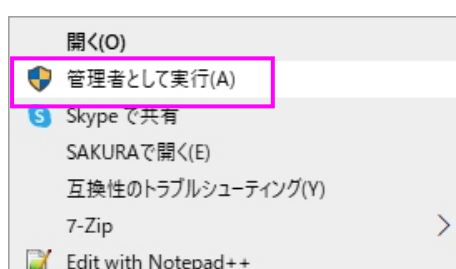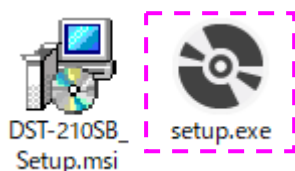


- (2) [インストール(I)]をクリックするとダウンロードが始まります。(ランタイムが無い場合)

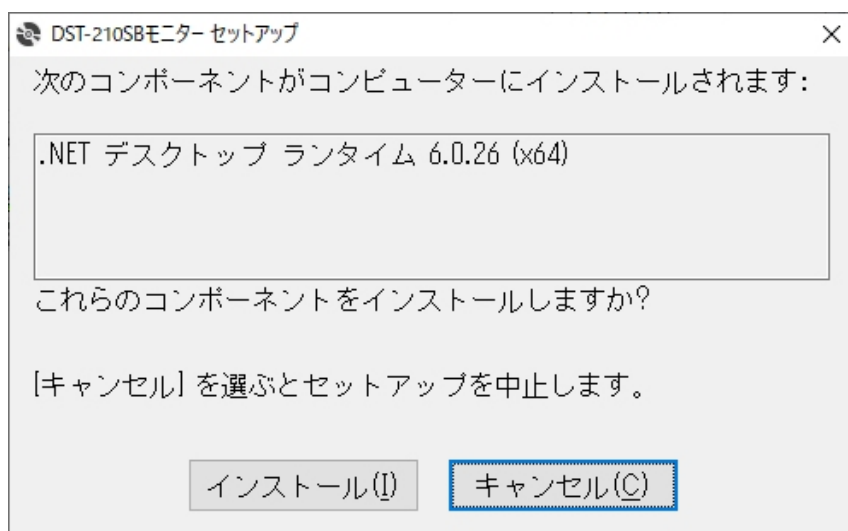


(3) [次へ(N)]をクリックします

インストール先やユーザーの選択は任意で変更してください。

(基本的には変更する必要はありません。)

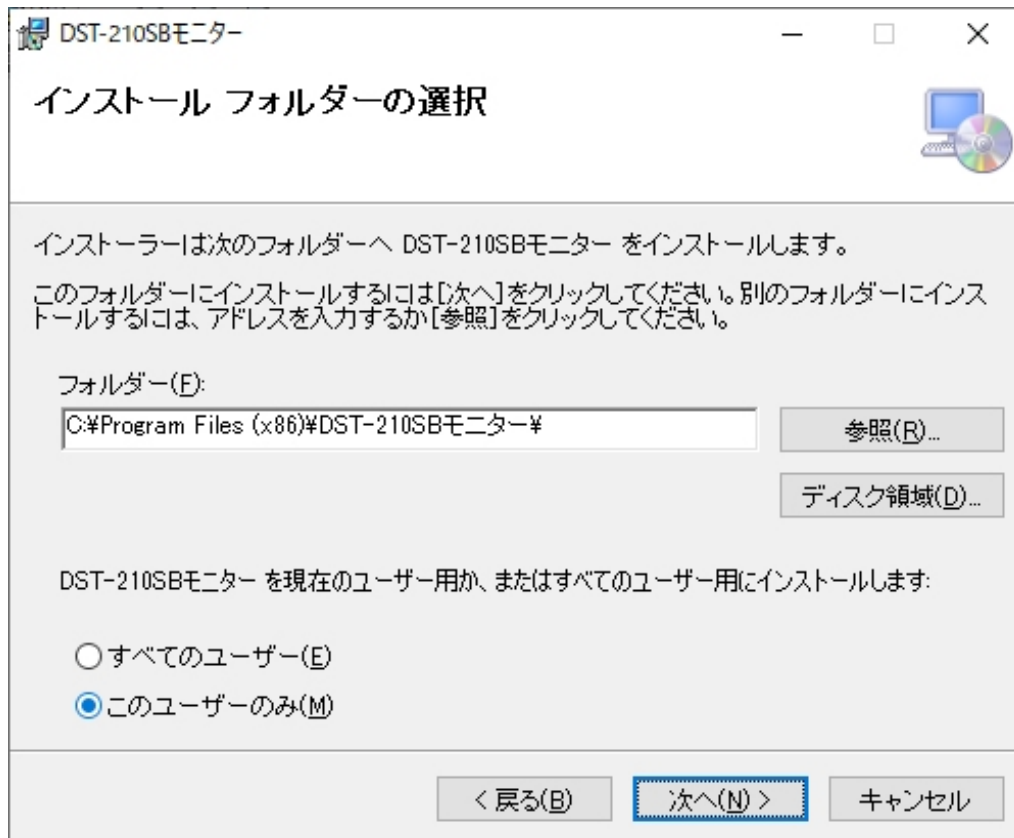


(4) [次へ(N)]をクリックし、インストールを開始します

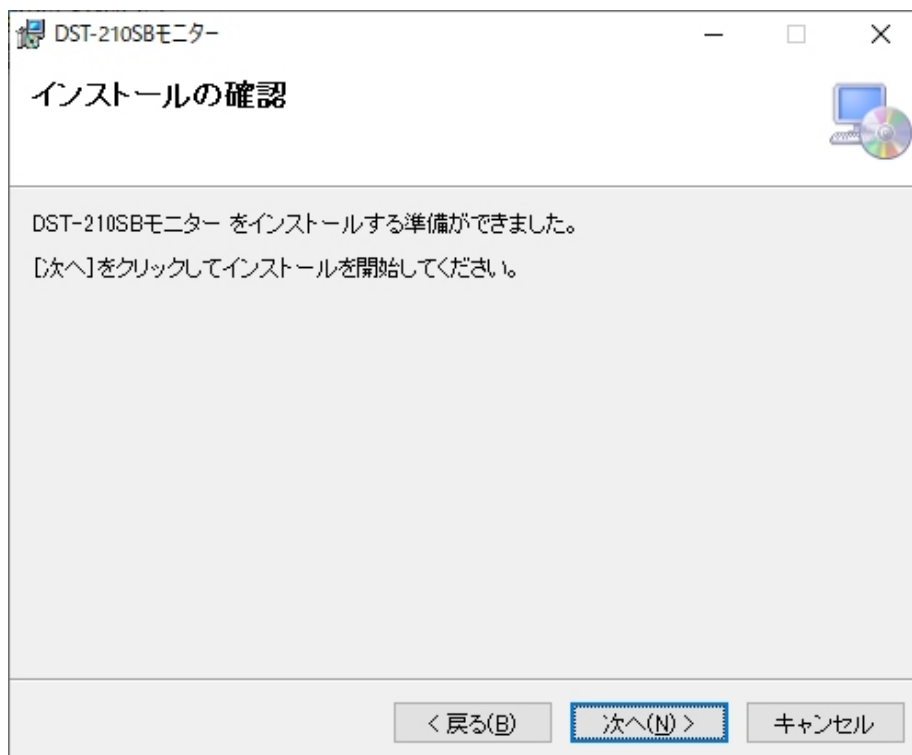

(5) [閉じる(C)]をクリックします

スタートメニュー、またはデスクトップのショートカットからモニターソフトを実行し、正常に起動するか確認してください。

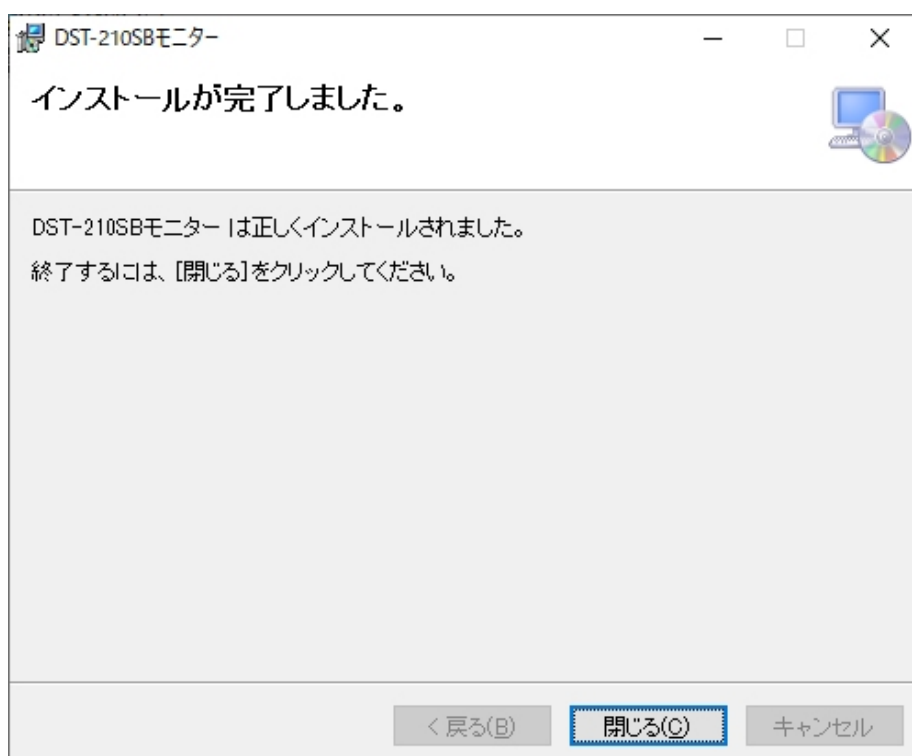

トラブルシューティング

モニターが動作しない場合は、以下をご確認ください。
身体計の操作に関しては、取扱説明書をご覧ください。

1. Bluetooth 通信は確立していますか？

身体計とパソコンのペアリングが成功すると、表示部の Bluetooth 通信インジケータが点灯します。また、周辺の電波環境により、通信が妨害されることがあります。



LED が点滅している場合は、Bluetooth 通信は有効ですが、接続が確立していません。
LED が消灯している場合は、身体計の Bluetooth 通信設定が無効になっていますので、ユーザー設定モードから有効にしてください。

2. 身体計の設定を変更しましたか？

機器のユーザー設定モードで下記設定を再度ご確認ください。


Bluetooth 通信 → 有効

Bluetooth 出力モード → 連続出力モード

Bluetooth 通信	有効	B: ON
	無効	B: OFF
Bluetooth 出力モード	シングル出力モード	d: 0
	連続出力モード	d: 1
Bluetooth ID	ID 設定 (0~9)	R: 0
バージョン表示 (表示のみで、右図はバージョン 1.0 の場合)		F: 1.0

3. モニターソフトは最新版ですか？

メニュー[ヘルプ(H)] → [サポートページを開く]をクリックすると、お使いのブラウザでのびおくんのホームページが開きます。最新版に更新することをお勧めします。

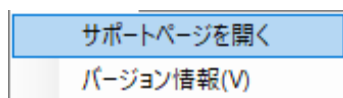

お問い合わせ窓口

トラブルシューティングでも解決しない場合は、弊社お客様窓口までメール、またはフリーダイヤルでお問い合わせください。

●メール(お問い合わせフォーム)

<https://muratec-kds.jp/contact/form/>

●フリーダイヤル

0120-25-5548(受付時間/平日 9:00~17:00)



お問い合わせ前の準備

メール、フリーダイヤルでお問い合わせの場合は以下の情報提供をお願いします。


1. 身体計のバージョン

電源 ON 後に表示が点滅したあと、下段に表示される数字です。(例はバージョン 1.0)



2. モニターソフトのバージョン

メニュー[ヘルプ(H)] → [バージョン情報(V)]をクリックしてください。

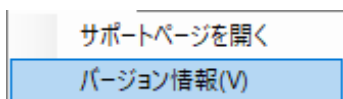

3. Windows のバージョン情報

お使いのパソコンの「Windows の仕様」をご確認ください。